

PATIËNTENTILIFTEN



MARY

De veelzijdige
verrijdbare passieve
patiëntentillift



TR-Care

MARY IS EEN FUNCTIONELE,
VEELZIJDIGE PASSIEVE
PATIËNTENTILLIFT.
DE COMPACTE EN ZEER
COMPLETE UITVOERING
VERHOGEN HET COMFORT
VAN WERKEN MET DEZE
PATIËNTENTILLIFT.


UITVOERINGEN

MARY passieve patiëntentillift is leverbaar in diverse uitvoeringen. Standaard voor MARY is de elektrische hoogte verstelling en elektrische pootbreedteverstelling. MARY passieve patiëntentillift is uit te voeren met:

- een 2-punts tiljuk, deze tillift heeft één snelheid hoog/laag en een elektrische pootbreedteverstelling. Het 2-punts tiljuk is t.b.v. tilbanden met lussen.
- een mechanisch 4-punts kanteljuk, deze tillift heeft één snelheid hoog/laag en een elektrische pootbreedteverstelling. Het mechanisch 4-punts kanteljuk is t.b.v. tilbanden met clips.
- een elektrisch 4-punts kanteljuk, deze tillift heeft één snelheid hoog/laag, elektrische pootbreedteverstelling en een elektrisch verstelbaar 4-punts kanteljuk. Het elektrisch 4-punts kanteljuk is t.b.v. tilbanden met clips.



MARY, DE VERRIJD BARE PATIËNTENTILLIFT
MET ELEKTRISCH 4-PUNTS KANTELJUK

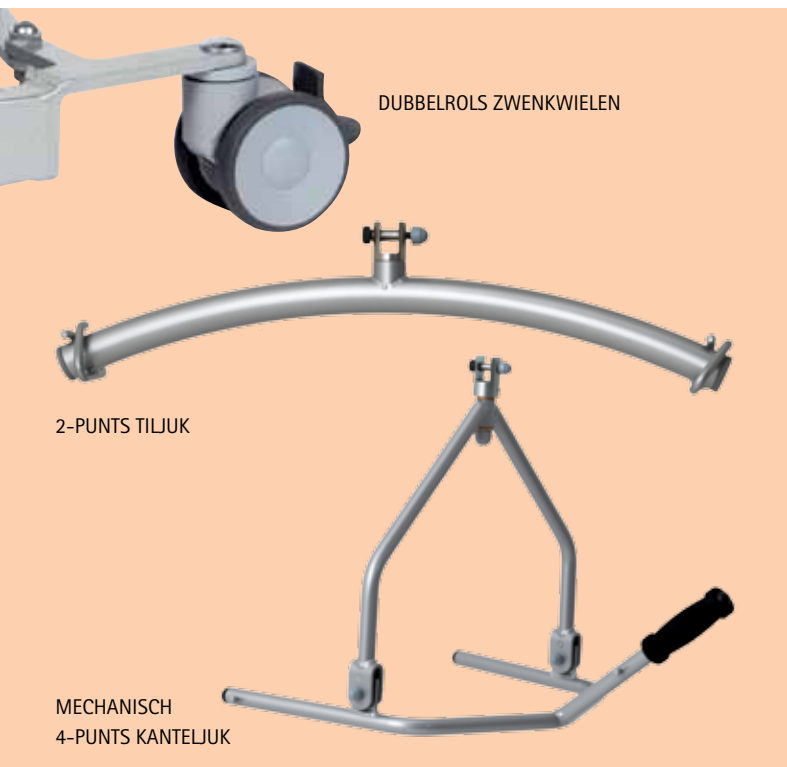

GEBRUIKSGEMAK

De hoogte van de kolom in combinatie met de lange tilarm zorgt ervoor dat lange en grote zorgbehoevenden ook comfortabel uit en in de (rol)stoel getild kunnen worden. Voor de zorgverlener is handmatig de zorgbehoevende goed positioneren in de (rol)stoel verleden tijd. Door de extra wijde pootspreiding zijn ook grote rolstoelen probleemloos te benaderen met MARY.

HANDBEDIENING

MARY passieve patiëntentillift wordt bediend met een eenvoudige en overzichtelijke handbediening. Deze handbediening is voorzien van een reksnoer, hierdoor kan de zorgverlener MARY van verschillende zijden bedienen. Alle functies van MARY patiëntentillift worden middels deze handbediening aangestuurd.

TILBANDEN

Tilbanden voor onze MARY passieve patiëntentillift zijn in diverse soorten stof en diverse maten verkrijgbaar. Daarnaast zijn er ook verschillende types tilbanden, zoals bijvoorbeeld een verblijfstilband, badtilband, toilettilband. De tilbanden kunnen worden uitgevoerd met een lus- of clipbevestiging. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

NOODSTOP

Op de elektrobox bevindt zich een noodstopknop waarmee alle functies met één druk op de knop uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast is er ook een noodschakeling voor de hoogteverstelling op de elektrobox aanwezig. Ook is het mogelijk om handmatig de tilarm te laten zakken met behulp van de noodzakknop op de hoog/laag motor.

ACCU'S OPLADEN


MARY passieve patiëntentillift is voorzien van een ingebouwde laadunit. Het opladen gebeurt met behulp van een laadsnoer. Daarnaast is het ook mogelijk een externe houder met extra accuset als laadstation te gebruiken. Met deze externe wandlader heeft u altijd een volle accu beschikbaar. MARY geeft een geluidssignaal af op het moment dat de capaciteit van de accu beneden de 50% komt.

OPTIMALE VERRIJDBAARHEID

De dubbelrols zwenkwielen, het lage gewicht en de compactheid van MARY passieve patiëntentillift zorgen voor een optimale verrijdbaarheid in alle situaties. MARY heeft zowel aan de voor- als aan de achterzijde dubbelrols zwenkwielen van 100 mm, hierdoor wordt het gewicht van de zorgbehoevende optimaal verdeeld en is de tillift (zelfs op vloerbedekking) licht en goed verrijdbaar.

De poten van MARY patiëntentillift hebben een geringe hoogte, zodat MARY eenvoudig in combinatie met hoog/laag bedden te gebruiken is. Daarnaast zorgt de pootbreedteverstelling van 611-1215 mm ervoor dat ook (rol)stoelen en het toilet goed te bereiken zijn.

Bij MARY passieve patiëntentillift wordt een gebruikershandleiding geleverd.

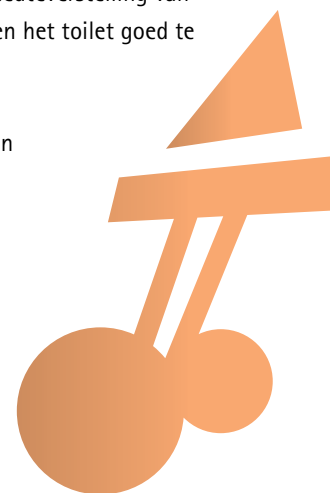

MARY

TECHNISCHE GEGEVENS

Maximaal tilgewicht	250 kg
Hoog/laag slag tilarm	640-2125 mm
Maximale tilhoogte	2125 mm
Minimale tilhoogte	640 mm
Hoogte kolom	1364 mm
Aantal tilhandelingen met 100 kg bij volle accu	ca. 70
Buitenmaat onderstel	650 mm
Binnenmaat onderstel	590 mm
Hoogte onderstel	135 mm
Lengte onderstel	1200 mm
Draaicirkel	1350 mm
Pootbreedteverstelling	611-1215 mm
Diameter dubbele wielen	Ø 100 mm
Totaal eigen gewicht	45 kg
Gewicht onderstel	25 kg
Gewicht kolom	20 kg
Gewicht accu	2,5 kg
Geluidsniveau	onder 50 dB
Lakafwerking	poedercoating
RAL kleur	RAL 9006
Demontabel	ja
Voltage	24 V DC
Accu	2 x 12 V/2,9 Ah
Lader	ingebouwd 24V/150mA
Opladen middels laadsnoer	standaard
Laadindicatie	ja
Noodstop	ja
Bij defecten zakken of tillen mogelijk	ja

OPTIES

- Extra accu met wandlader
- Weegunit

TILBANDEN


Diverse tilbanden leverbaar.

NORMERINGEN

MARY voldoet aan de medische richtlijnen voor klasse 1-apparatuur (MDD 93/42EEC), EN 60601-1, EN 60601-1-2, ISO 10535

MODELLEN

- MARY 2 passieve patiëntentillift met 2-punts tiljuk (t.b.v. tilbanden met lussen)
- MARY 4M passieve patiëntentillift met mechanisch 4-punts kanteljuk (t.b.v. tilbanden met clips)
- MARY 4E passieve patiëntentillift met elektrisch 4-punts kanteljuk (t.b.v. tilbanden met clips)

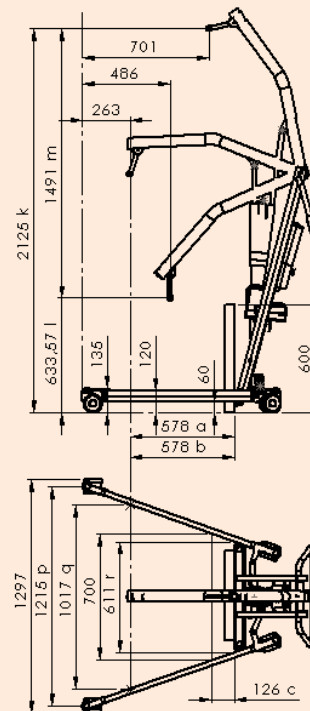

TR-Care, leverancier en adviseur Al meer dan 20 jaar is TR-Care gespecialiseerd in het inrichten van sanitaire ruimtes voor de gezondheidszorg. Het leveringsprogramma omvat o.m. hoog-laag baden, bedpanspoelers, plafondtilliftsystemen, douche-badwagens, in hoogte verstelbare toiletssystemen, verpleegmeubilair en patiëntentilliften. Sleutelwoorden daarbij zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid en service. Innovatie en productontwikkeling heeft onze continue aandacht. Hiervoor werken wij intensief samen met toonaangevende producenten, zoals TR-Equipment AB, Patient Lifting Solutions, Medi Casa GmbH en Discher Technik GmbH. Hebt u specifieke wensen, dan bent u bij TR-Care aan het goede adres!