



Hoog-laag bad Swing

Comfort en veiligheid voor personen die beperkt zijn in hun mobiliteit

Het innovatieve Swing zit- & ligbad is een gebruiksvriendelijk en comfortabel alternatief voor standaard badsystemen. Swing zit- & ligbad met geïntegreerde zijdeur maakt het mogelijk om vanaf de zijkant in het bad te stappen. De vormgeving van Swing onderscheidt zich door comfortabele, naar het lichaam gevormde contouren en een prettige hoofdondersteuning. Swing zit- & ligbad is standaard voorzien van een elektrische kantelverstelling. Met een druk op de knop kantelt de badkuip naar de gewenste stand voor de verzorgende, zodat de rug minder wordt belast.

In de gekantelde stand wordt de cliënt optimaal ondersteund en kan de verzorgende hem/haar zonder onnodige inspanning wassen en verzorgen.



Werking van het Swing bad



Hoe werkt het?

Terwijl de zijdeur geopend is, laat u het bad bij de voetenruimte vollopen. Zodra de cliënt op de zitplaats in het bad heeft plaats genomen, doet u de deur dicht en bedient u de knop waarmee u de badkuip kunt kantelen. De badkuip gaat dan naar de ligstand, waardoor het water uit de voetenruimte zachtjes om de cliënt heen stroomt.

De vrije ruimte onder Swing zit- & ligbad is voldoende om de cliënt eventueel met een passieve tillift in het bad te helpen.

Technische gegevens

Hoog-laag bad Swing

Badkuip en bekleding	Glasvezelversterkt polyester met coating
Deurframe	Aluminium profielen
Badframe	Roestvaststaal
Elektriciteit	Aansluitingen en transformator in waterdichte behuizing (beschermingsgraad IP 68)
Gewicht leeg bad	140 kg



Specificaties

- De Swing is uitgerust met een thermostaatmengkraan en een handdouche met instelbare waterstraal. De thermostaat beschikt over een beveiliging tegen hoge temperaturen, die voldoet aan de meest recente Europese normen.

Opties

- Elektrisch in hoogte te verstellen
- Whirlpool met 10 sproeimondjes die warme lucht blazen. De whirlpool wordt gebruikt voor stimulatie en ontspanning
- Desinfectie-unit, ingebouwd in het bad
- Automatische badvulstop

Afmetingen

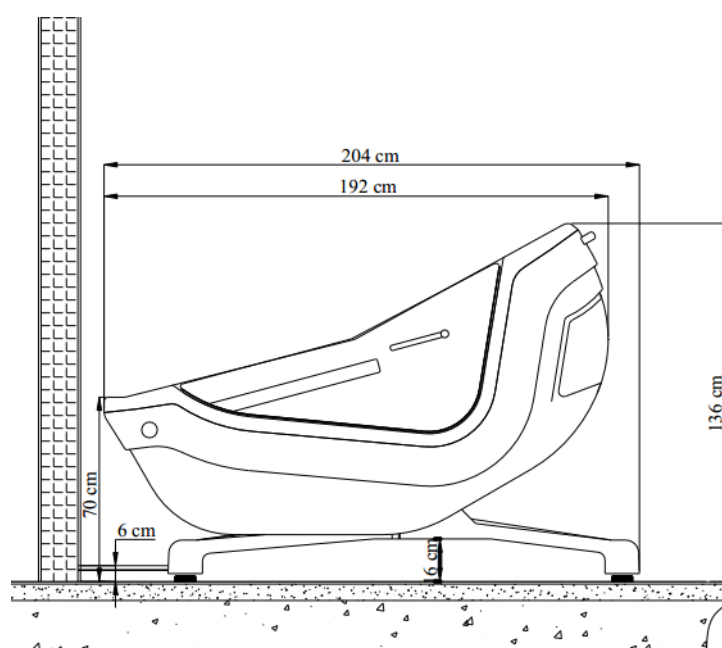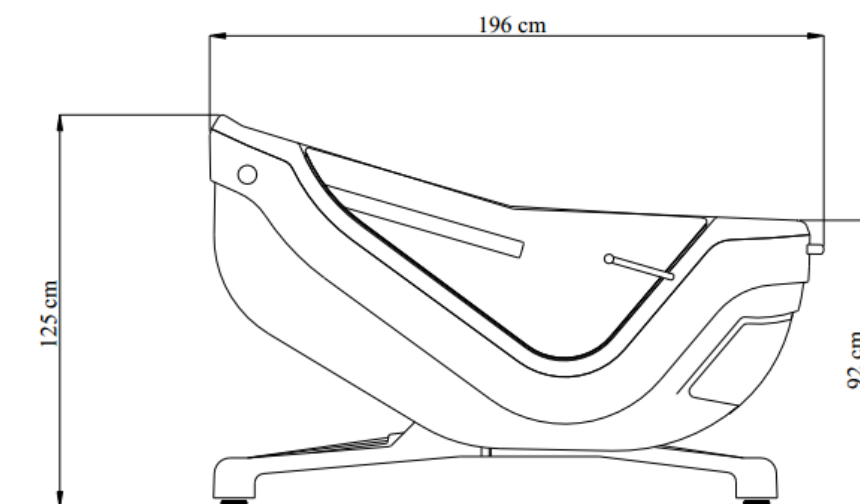

Contactgegevens



Adres

Arkeneel 4
3905 NS Veenendaal

Contactgegevens

Telefoon: 085-4858390
E-mail: info@tr-care.nl
Website: www.tr-care.nl